

# PowerTel 2880



Bedienungs-  
anleitung





# Inhalt

<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>4</b>
Verpackungsinhalt prüfen .....	4
<b>Einrichten des Telefonsystems</b> .....	<b>4</b>
Aufstellort .....	4
Tischgerät anschließen .....	5
Mobilteil in Betrieb nehmen .....	7
Ladestation anschließen .....	8
Netzausfall-Batterien einsetzen .....	9
Wandmontage .....	10
<b>Bedienelemente</b> .....	<b>13</b>
Mobilteil .....	13
Tischgerät .....	16
<b>Symbole im Display</b> .....	<b>20</b>
<b>Navigation im Menü</b> .....	<b>21</b>
Hauptmenü öffnen (Mobilteil) .....	21
Menüaufbau (Mobilteil) .....	21
Hauptmenü öffnen (Tischgerät) .....	22
Menüaufbau (Tischgerät) .....	23
<b>Telefonieren</b> .....	<b>24</b>
Anrufen, Gespräch annehmen und beenden .....	24
Freisprechen .....	25
Audio-Assistent .....	25
Equalizer .....	25
Lautstärke einstellen .....	25
Mikrofon ausschalten .....	26
Tonruf ausschalten .....	26
Wahlwiederholung .....	26
Anrufliste .....	27
Kettenwahl .....	28
Mobilteil rufen (Sammelruf/Paging) .....	28
Interngespräch .....	29

Externes Gespräch intern weiterleiten . . . . .	29
Konferenz . . . . .	30
<b>Telefonbuch . . . . .</b>	<b>31</b>
Einen Telefonbucheintrag anlegen . . . . .	31
Telefonbucheinträge nutzen . . . . .	31
<b>Foto-Kurzwahl . . . . .</b>	<b>32</b>
Foto-Kurzwahl speichern . . . . .	32
Foto-Kurzwahl ändern . . . . .	32
Foto-Kurzwahl löschen . . . . .	33
Foto-Kurzwahl wählen . . . . .	33
<b>Erinnerungen . . . . .</b>	<b>33</b>
Erinnerung hinzufügen . . . . .	34
Erinnerungen überprüfen . . . . .	34
Erinnerung löschen . . . . .	35
<b>Einstellungen . . . . .</b>	<b>35</b>
Ruftöne . . . . .	35
Tastenton am Tischgerät . . . . .	35
Töne am Mobilteil . . . . .	36
Zeit/Datum einstellen . . . . .	36
Zeitformat einstellen . . . . .	36
Datumsformat einstellen . . . . .	37
Displaysprache einstellen . . . . .	37
Sprache für Ansagen einstellen . . . . .	37
Anzeige für MWI löschen . . . . .	38
Gerätenamen ändern . . . . .	38
CID Zeitsynchronisation . . . . .	39
Wahlverfahren einstellen . . . . .	39
Flashzeit einstellen . . . . .	40
Weiteres Mobilteil anmelden (Tischgerät) . . . . .	40
Auslieferungszustand wiederherstellen . . . . .	41
Ruhemodus . . . . .	41

<b>Anrufbeantworter</b> .....	<b>42</b>
Anrufbeantworter ein-/ausschalten .....	42
Nachrichten hören .....	43
Eigene Ansage aufnehmen .....	44
Mithören .....	45
Anruf übernehmen .....	46
Nachrichten löschen .....	46
Memo aufnehmen .....	47
Annahmeverzögerung einstellen .....	47
Fernabfragecode einstellen .....	48
Nachrichten-Hinweiston .....	48
Aufnahmezeit einstellen .....	49
Fernbedienung des Anrufbeantworters .....	50
<b>Anhang</b> .....	<b>51</b>
Falls Probleme auftauchen .....	51
Sicherheitsinformationen .....	51
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	51
Aufstellungsort .....	52
Stromversorgung .....	52
Energiesparendes Netzteil .....	52
Medizinische Geräte und Gefahren .....	53
Akkus/Batterien .....	53
Kompatibilität mit Hörgeräten .....	53
Entsorgung .....	53
Technische Daten .....	54
Wartung .....	55
Garantie .....	55
Konformitätserklärung .....	56

# Inbetriebnahme

**Wichtig: Lesen Sie vor der Inbetriebnahme Ihres Telefons unbedingt die Sicherheitsinformationen ab Seite 51.**

## Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang eines PowerTel 2880 gehören:

- 1 Tischgerät (Basisstation)
- 1 Hörer
- 1 Höreranschluss schnur
- 1 Netzteil für das Tischgerät
- 1 Schnurlostelefon (Mobilteil)
- 3 Akkus AAA NiMH
- 1 Akkufachdeckel
- 1 Ladestation
- 1 Netzteil für die Ladestation
- 1 Telefonanschlusskabel

**Wichtig: Verwenden Sie nur die Netzteile, das Telefonanschlusskabel und die Akkus, die zum Lieferumfang Ihres PowerTel 2880 gehören. Andernfalls ist die einwandfreie Funktion Ihres Telefons nicht gewährleistet.**

## Einrichten des Telefonsystems

### Aufstellort

Stellen Sie das Tischgerät in der Nähe einer Netzsteckdose und der Telefonanschlussdose auf, so dass die Länge der Anschlusskabel ausreicht. Halten Sie einen Abstand von ca. 1 m zu anderen elektronischen Geräten ein, um eine gegenseitige

Beeinflussung auszuschließen. Die Verbindung zwischen dem Tischgerät und dem Mobilteil geschieht mittels Funksignalen. Die Signalstärke ist abhängig vom Standort. Die maximale Reichweite beträgt ca. 300 m. Wände, Türen und Gegenstände im Gebäude verringern jedoch unterschiedlich stark die Reichweite.


## **Tischgerät anschließen**

Platzieren Sie das Tischgerät so, dass Sie mit den mitgelieferten Kabeln sowohl eine Netzsteckdose als auch den Telefonanschluss erreichen können.

1. Stecken Sie den am Ende des Kabels befindlichen Stecker in die entsprechend gekennzeichnete Buchse an der Unterseite des Tischgerätes und das Netzteil in die Steckdose.
2. Stecken Sie das Ende des Telefonanschlusskabels mit dem kleinen Stecker in die entsprechend gekennzeichnete Buchse des Tischgerätes und das andere Ende in die Telefonsteckdose.
3. Verbinden Sie den Hörer mit der gewendelten Hörschnur mit dem Telefon.

**Hinweis:** Führen Sie die Anschlusskabel durch die Kabelführungen, damit das Tischgerät flach auf der Unterlage steht.

Bei steckbaren Geräten muss die Steckdose (Netzteil) in der Nähe des Gerätes installiert und leicht zugänglich sein.

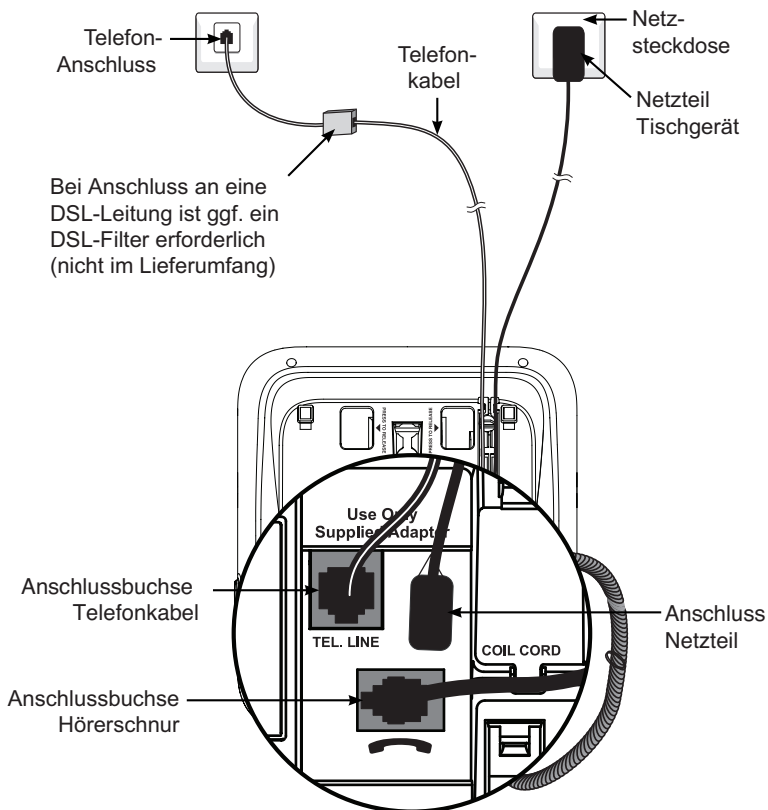


**Wichtig: Verwenden Sie nur die Netzteile, das Telefonanschlusskabel und die Akkus, die zum Lieferumfang Ihres PowerTel 2880 gehören. Andernfalls ist die einwandfreie Funktion Ihres Telefons nicht gewährleistet. Versperren Sie den Zugang zum Steckernetzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände.**



# Mobilteil in Betrieb nehmen

1. Öffnen Sie das Akkufach und legen Sie die Akkus ein. Achten Sie auf die richtige Polarität.
2. Schieben Sie den Akkufachdeckel wieder auf, bis er spürbar einrastet.

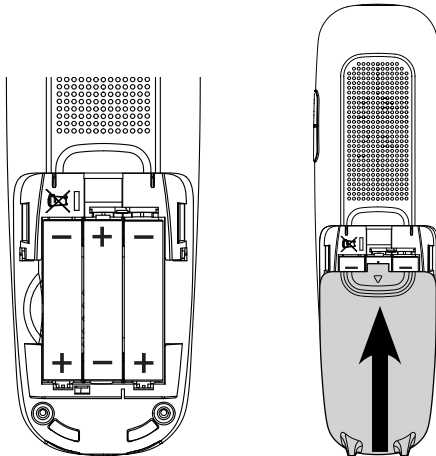


Damit das Mobilteil vollständig geladen wird, muss es mindestens 16 Stunden in die Ladestation gesetzt werden (Stromversorgung der Ladestation prüfen!).

**Wichtig: Verwenden Sie unbedingt nur die mitgelieferten Akkus. Auch bei einem späteren Austausch darf nur dieser Akkutyp verwendet werden.**

# Ladestation anschließen

1. Stecken Sie den am Ende des Kabels befindlichen Stecker in die Buchse an der Unterseite der Ladestation und das Netzteil in die Steckdose.

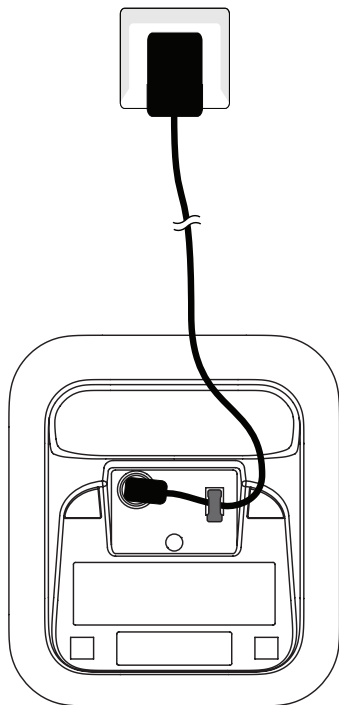

2. Stellen Sie das Mobilteil zum Laden in die Ladestation.

**Hinweis:** Führen Sie das Anschlusskabel durch die Kabelführung, damit die Ladestation flach auf der Unterlage steht.


Bei steckbaren Geräten muss die Steckdose (Netzteil) in der Nähe des Gerätes installiert und leicht zugänglich sein.

# Netzausfall-Batterien einsetzen

Legen Sie 3 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang) in das Tischgerät ein, so dass Sie Ihr Telefon bei einem Stromausfall weiterhin benutzen können.

**ACHTUNG: Trennen Sie das Tischgerät immer vom Telefonnetz, wenn Sie die Batterien einsetzen/austauschen!**

1. Entriegeln Sie den Batteriefachdeckel an der Sperrklinke und heben Sie den Deckel ab.
2. Legen Sie 3 AAA-Batterien in das Batteriefach (Polarität beachten!).

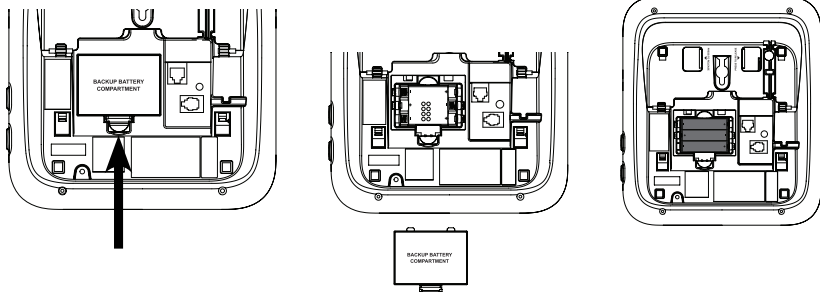

3. Setzen Sie den Deckel wieder auf und achten Sie darauf, dass die Sperrklinke wieder einrastet.


**Hinweis:** Bei normalen Betriebsbedingungen sollten Sie die Batterien ca. alle 6 Monate erneuern, um die Funktion zu gewährleisten. Die Lebensdauer der Batterien ist abhängig von der Häufigkeit und der Dauer eines Stromausfalls.

# Wandmontage



Zur Wandmontage des Tischgerätes benötigen Sie ggf. 2 Dübel und 2 geeignete Schrauben, vorzugsweise Linsenkopf, 4 mm Durchmesser. Die Schrauben müssen im Abstand von 83 mm senkrecht untereinander angebracht werden und die Köpfe ca 3 mm von der Wand abstehen.

**ACHTUNG: Achten Sie beim Bohren auf Stromleitungen oder Wasserrohre!**


1. Trennen Sie die Steckverbindungen für Netzteil und Telefonkabel am Tischgerät.
2. Entnehmen Sie den Halter in der Hörermulde und stecken Sie ihn um 180° gedreht wieder ein.

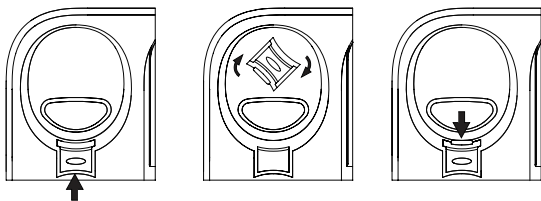


3. Drücken Sie die Laschen wie durch die Pfeile gezeigt zusammen, um die Scharnierklammern zu öffnen. Verlegen Sie das Telefonkabel und das Netzteilkabel durch das Loch der Wandhalterung. Stecken Sie das Ende des Telefonkabels in die Telefonbuchse und den Stecker des Netzteils in die Netzteilbuchse an der Unterseite des Telefons.

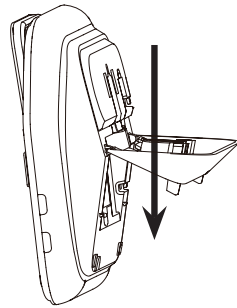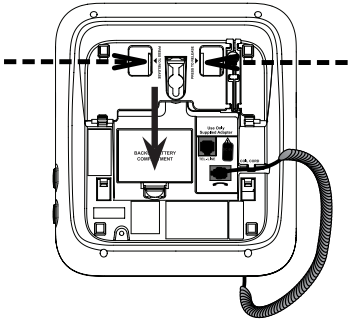

4. Klappen Sie die Wandhalterung herunter und verriegeln Sie sie in dieser Position. Verlegen Sie das Telefonkabel und Netzteilkabel durch den Schlitz an der Unterseite des Telefons. Bündeln Sie das Telefonkabel und das Netzteilkabel ggf. mit Kabelbindern o. ä.

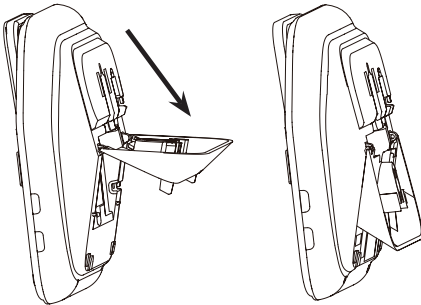


5. Stecken Sie das Netzteil und das Telefonkabel wieder in die Dosen.
6. Setzen Sie das Telefon auf die Schraubenköpfe und ziehen Sie es leicht herunter bis es fest sitzt.

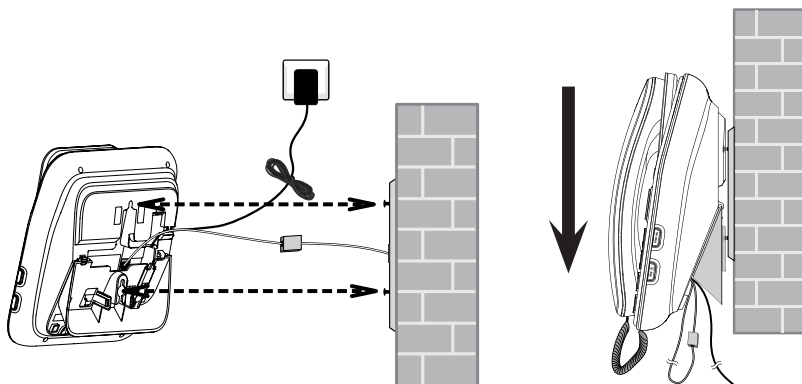

7. Hängen Sie den Hörer auf die Ablage und justieren Sie den Winkel des Displays, um eine gute Ablesbarkeit zu erreichen.

# Bedienelemente

## Mobilteil

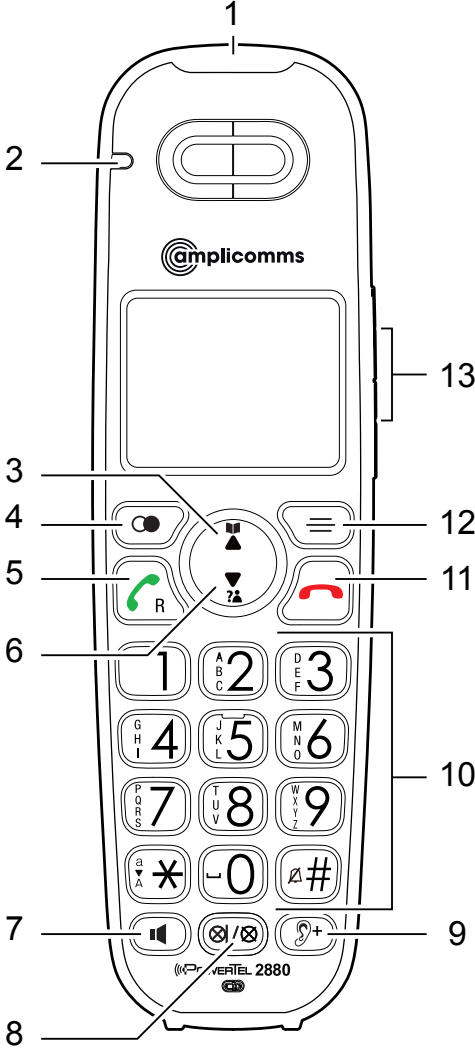

- 1 **Anrufanzeige**
  - Blinkt bei Anruf oder Ruf vom Tischgerät.
- 2 **Ladeanzeige**
  - Leuchtet, wenn Mobilteil geladen wird.
- 3 **Telefonbuch / Aufwärts**
  - Im Ruhezustand: Telefonbuch öffnen.
  - Im Menü / in Listen: Aufwärts blättern.
  - Bei Eingabe von Namen/Zahlen: Cursor nach rechts verschieben.
- 4 **Wahlwiederholung / Pause**
  - Im Ruhezustand: Wahlwiederholung öffnen / mit wiederholtem Drücken durch die Liste blättern.
  - Während Rufnummerneingabe: Langer Tastendruck fügt Wählpause ein.
- 5 **Anrufen-Taste / R-Taste**
  - Anrufen oder Anruf annehmen.
  - Während eines Gesprächs: Flashfunktion zur Nutzung von Netz-Leistungsmerkmalen.
- 6 **Anrufliste / Abwärts**
  - Im Ruhezustand: Anrufliste öffnen.
  - Im Menü / in Listen: Abwärts blättern.
  - Bei Eingabe von Namen / Zahlen: Cursor nach links verschieben.
- 7 **Lautsprecher-Taste**
  - Im Freisprechmodus anrufen oder Anruf annehmen.
  - Während eines Gesprächs: Lautsprecher ein-/ausschalten.
- 8 **Stumm-Taste / Löschen**
  - Während eines Gesprächs: Mikrofon ausschalten
  - Bei Anruf: Tonruf ausschalten (Gespräch kann weiterhin angenommen werden, solange der Anrufer nicht aufgelegt hat).
  - Einzelne Einträge in Listen löschen (Anrufliste / Wahlwiederholung / Telefonbuch / Erinnerungen).



## 9 **Audio-Assistent**

- Während eines Gesprächs: Verbesserung des Klangs und Erhöhung der Lautstärke.

## 10 **Wähltastatur**

- Eingabe von Ziffern oder Buchstaben.
- Mit beliebiger Taste eintreffende Anrufe annehmen.
- **Stern-Taste** bei Eingabe von Namen: Umschaltung zwischen Groß- und Kleinbuchstaben.
- **Raute-Taste** im Ruhezustand: Langer Tastendruck zum Einschalten des Ruhemodus / Ausschalten des aktiven Ruhemodus.

## 11 **Auflegen-Taste / Abbruch**

- Während eines Gesprächs: Auflegen.
- Im Menü: Auswahl abbrechen / zurück zum vorherigen Menü / lange drücken, um zum Ruhezustand zurückzukehren.
- Bei Anruf: Tonruf ausschalten (Gespräch kann weiterhin angenommen werden, solange der Anrufer nicht aufgelegt hat).
- Im Ruhezustand: Langer Tastendruck löscht Anzeige für verpasste Anrufe.


## 12 **Menü / Auswahl**

- Im Ruhezustand: Menü öffnen.
- Im Menü: Menüpunkt auswählen oder Speichern.

## 13 **Lautstärketasten**

- Im Ruhezustand: Klingellautstärke einstellen.
- Während eines Gesprächs / Abhören des Anrufbeantworters: Lautstärke einstellen.

# Tischgerät

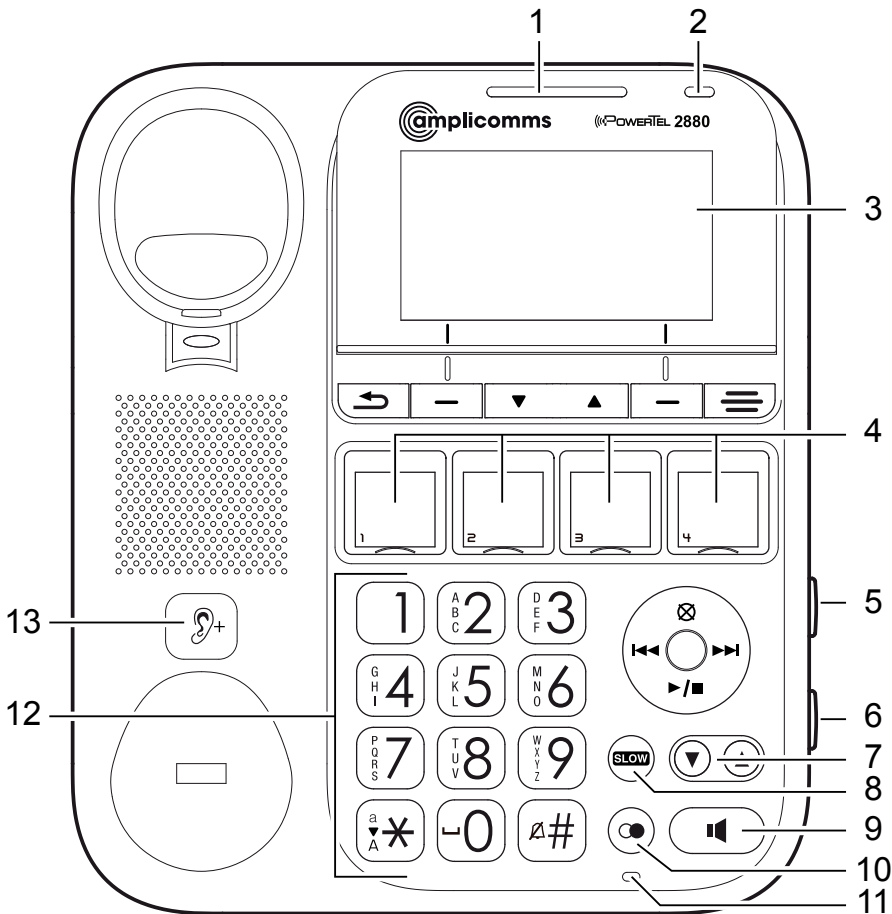

## 1 Anrufanzeige

- Blinkt bei Anruf.

## 2 Anzeige „Im Gebrauch“

- Leuchtet bei Anruf, Gespräch oder bei Annahme eines Gesprächs durch den Anrufbeantworter.

- Leuchtet, wenn ein Mobilteil angemeldet wird.
  - Blinkt, wenn Mobilteile abgemeldet werden.
  - Blinkt, wenn ein anderes Gerät (Mobilteil) bereits die Leitung belegt.
- 3 **Display**
- Das Display kann zur besseren Lesbarkeit auf- und zurückgeklappt werden.
- 4 **Schnellwahltasten**
- Im Ruhezustand: Drücken, um eine Rufnummer auf die jeweilige Taste zu speichern oder zu wählen.
- 5 **Ruftaste**
- Im Ruhezustand: Drücken, um alle angemeldeten Mobilteile zu rufen.
- 6 **Anrufbeantworter ein/aus**
- Drücken, um den Anrufbeantworter ein- oder auszuschalten. Leuchtet, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.
- 7 **Lautstärketasten**
- Im Ruhezustand: Klingellautstärke einstellen.
  - Während eines Gesprächs/Abhören des Anrufbeantworters: Lautstärke einstellen.
- 8 **Slow-Taste**
- Verlangsamt die Wiedergabe beim Abhören von Anrufbeantworter-Nachrichten oder Erinnerungen
- 9 **Lautsprecher-Taste**
- Im Freisprechmodus anrufen, Anruf annehmen oder Gespräch beenden.
  - Während eines Gesprächs: Lautsprecher ein-/ausschalten.
- 10 **Wahlwiederholung/Pause**
- Im Ruhezustand: Wahlwiederholung öffnen/mit wiederholtem Drücken durch die Liste blättern.
  - Während Rufnummerneingabe: Langer Tastendruck fügt Wählpause ein.


## 11 Mikrofon

## 12 Wähltastatur

- Eingabe von Ziffern oder Buchstaben.
- Mit beliebiger Taste eintreffende Anrufe annehmen.
- **Stern-Taste** bei Eingabe von Namen: Umschaltung zwischen Groß- und Kleinbuchstaben.
- **Raute-Taste** im Ruhezustand: Langer Tastendruck zum Einschalten des Ruhemodus/Ausschalten des aktiven Ruhemodus.

## 13 Audio-Assistent

- Während eines Gesprächs: Verbesserung des Klangs und Erhöhung der Lautstärke.

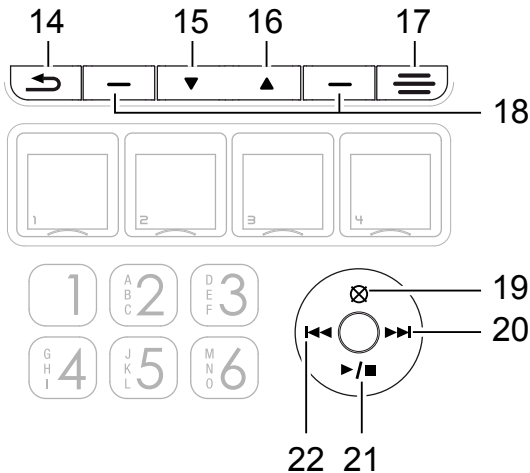

## 14 Abbruch

- Im Menü: Auswahl abbrechen/ zurück zum vorherigen Menü / Lange drücken um zum Ruhezustand zurückzukehren.
- Bei Anruf: Tonruf ausschalten (Gespräch kann weiterhin angenommen werden, solange der Anrufer nicht aufgelegt hat).

- Im Ruhezustand: Langer Tastendruck löscht Anzeige für verpasste Anrufe.

## 15 **Abwärts**

- Im Menü/in Listen: Abwärts blättern.
- Bei Eingabe von Namen/Zahlen: Cursor nach links verschieben.

## 16 **Aufwärts**

- Im Menü/in Listen: Aufwärts blättern.
- Bei Eingabe von Namen/Zahlen: Cursor nach rechts verschieben.

## 17 **Menü-Taste**

- Im Ruhezustand: Menü öffnen.

## 18 **Linker Softkey/Rechter Softkey**

- Auswahl des jeweils über der Taste stehenden Text-Begriffs.

## 19 **Lösch-Taste**

- Löschen der aktuell abgespielten Anrufbeantworter-Mitteilung, Ansage oder Erinnerung.
- Einzelne Einträge in Listen löschen (Anrufliste/Wahlwiederholung/Telefonbuch/Erinnerungen).

## 20 **Vorwärts-Taste**

- Weiterspringen zur nächsten Nachricht während des Abhörens des Anrufbeantworters.
- Bei Eingabe von Namen/Zahlen: Cursor nach rechts verschieben.

## 21 **Start-/Stopp-Taste**










- Abhören des Anrufbeantworters starten/stoppen.
- Blinkt bei neuen Nachrichten/Memos auf dem Anrufbeantworter.

## 22 **Zurück-Taste**

- Aktuelle Nachricht während des Abhörens des Anrufbeantworters wiederholen.
- Zweimal drücken, um vorherige Nachricht abzuspielen.

- Bei Eingabe von Namen/Zahlen: Cursor nach links verschieben.







## Symbole im Display

	Akku schwach, bitte aufladen (Mobilteil).
	Akku voll aufgeladen (Mobilteil).
	Akkukapazität ca. 2/3 (Mobilteil).
	Akkukapazität ca. 1/3 (Mobilteil).
	Freisprechen ist eingeschaltet (Mobilteil).
	Tonruf ausgeschaltet (Mobilteil/Tischgerät).
	Neue Nachricht auf Ihrem Netzanrufbeantworter (Mobilteil/abhängig vom Netzbetreiber).
	Neue Nachricht auf Ihrem Netzanrufbeantworter (Tischgerät/abhängig vom Netzbetreiber).
<b>MUTE</b>	Mikrofon ausgeschaltet (Mobilteil/Tischgerät).
<b>NEW</b>	Neuer Eintrag in der Anrufliste (Mobilteil/Tischgerät).
<b>ANS ON</b>	Anrufbeantworter eingeschaltet (Mobilteil/Tischgerät).
	Neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (Mobilteil/Tischgerät).

# Navigation im Menü

In diesem Kapitel ist beschrieben, wie Sie die Funktionen beider Telefone über die Menüs aufrufen können.

## Hauptmenü öffnen (Mobilteil)

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie mit  und  den gewünschten Menüpunkt aus und drücken Sie .
3. Drücken Sie , um die Aktion abzubrechen, zurück zum vorherigen Menüpunkt zu gelangen oder das Menü zu verlassen.
4. Halten Sie  gedrückt, um in den Ruhezustand zurückzukehren.

**Hinweis:** Wenn innerhalb von 30 s keine Taste gedrückt wird, kehrt das Gerät automatisch in den Ruhezustand zurück.

## Menüaufbau (Mobilteil)

Nachr. hören

Anrufbeantw.

Ansage

Alte N. lösch.

Memo aufnehm.

AB ein/aus

AB Einstell.

Intercom

Telefonbuch

Überprüfen

Kontakt zfüg.





Anrufliste

Überprüfen

Alle Anr. lösch

Erinnerung	Erinn. überpr. Erinn. einst. Ein/Aus
Ruftöne	Rufton-Lautst. Rufton-Klang
Töne	Tastenton Akku leer Außer Reichw.
Datum/Zeit	
Zeitformat	
Datumsformat	
Einstellungen	Displaysprache Ansagesprache MWI löschen MT umbenennen CID Zeitsync. Wahlverfahren Flashzeit
Zurücksetzen	

## Hauptmenü öffnen (Tischgerät)

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie mit  den gewünschten Menüpunkt aus und drücken Sie **AUSWAHL**.
3. Drücken Sie , um die Aktion abzubrechen, zurück zum vorherigen Menüpunkt zu gelangen oder das Menü zu verlassen.
4. Halten Sie  gedrückt, um in den Ruhezustand zurückzukehren.

**Hinweis:** Wenn innerhalb von 30 s keine Taste gedrückt wird, kehrt das Gerät automatisch in den Ruhezustand zurück.



# Menüaufbau (Tischgerät)

Anrufbeantw.      Ansage  
                         Alte N. lösch.  
                         Memo aufnehm.  
                         AB ein/aus  
                         AB Einstell.

Intercom

Foto Kurzwahl

Telefonbuch

Überprüfen  
Kontakt zufüg.

Anrufliste

Überprüfen  
Alle Anr. lösch

Erinnerung

Erinn. überpr.  
Erinn. einst.  
Erinn. ein/aus

Ruftöne

Rufton-Lautst.  
Rufton-Klang

Tastenton

Datum/Zeit

Zeitformat

Datumsformat

Einstellungen


Displaysprache  
Ansagesprache  
MWI löschen  
BS umbenennen  
CID Zeitsync.  
Wahlverfahren  
Flashzeit  
Anmeldung

Zurücksetzen


# Telefonieren

## Anrufen, Gespräch annehmen und beenden


### Am Tischgerät anrufen

Geben Sie die Rufnummer ein und heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie .

- oder -


Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie . Wenn Sie den Wählton hören, geben Sie die Telefonnummer ein.

### Am Tischgerät Gespräch annehmen



Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie  oder eine beliebige Zifferntaste.

### Am Tischgerät Gespräch beenden



Wenn Sie mit dem Hörer telefonieren, legen Sie den Hörer auf.

Wenn Sie über den Lautsprecher telefonieren, drücken Sie .

### Mit dem Mobilteil anrufen

Geben Sie die Rufnummer ein und drücken Sie  oder  oder


- oder -

Drücken Sie  oder . Wenn Sie den Wählton hören, geben Sie die Telefonnummer ein.



### Am Mobilteil Gespräch annehmen

Drücken Sie  oder  oder eine beliebige Zifferntaste.

### Am Mobilteil Gespräch beenden



Drücken Sie  oder stellen Sie das Mobilteil in die Ladestation.

## Freisprechen

Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste  am Tischgerät bzw.  am Mobilteil. Zum Ausschalten der Freisprechfunktion drücken Sie die Taste erneut.





## Audio-Assistent



Diese Funktion verbessert die Klangwiedergabe und erhöht die Lautstärke im Hörer. Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste  am Tischgerät bzw.  am Mobilteil. **VORSICHT: Die Lautstärke ist sehr hoch!** Zum Ausschalten der Funktion drücken Sie die Taste erneut.

## Equalizer

Mit dieser Funktion können Sie die Tonqualität für Hörer und Lautsprecher verändern.


1. Drücken Sie während eines Gesprächs die Menütaste  bzw. .
2. Drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil , um die Einstellung aufzurufen.
3. Wählen Sie **Natürlich**, **Höhen 1**, **Höhen 2** oder **Bass** und drücken Sie am Tischgerät **SPEICH.** bzw. am Mobilteil , um die Einstellung zu speichern.

## Lautstärke einstellen

### Am Mobilteil

Drücken Sie während eines Gesprächs die seitlich angebrachten Lautstärketasten.

### Am Tischgerät

Drücken Sie während eines Gesprächs die Lautstärketasten  .

## Mikrofon ausschalten

Sie können das Mikrofon ausschalten, so dass Ihr Gesprächspartner am Telefon Sie nicht hören kann.

### Am Mobilteil

Drücken Sie während eines Gesprächs . Zum Einschalten des Mikrofons drücken Sie  noch einmal.


### Am Tischgerät

Drücken Sie während eines Gesprächs **MIK AUS**. Zum Einschalten des Mikrofons drücken Sie **MIK EIN**.

## Tonruf ausschalten

Sie können bei einem eintreffenden Anruf den Tonruf ausschalten, ohne dass die Verbindung getrennt wird. Das Gespräch kann weiterhin angenommen werden, solange der Anrufer noch nicht aufgelegt hat. Beim nächsten Anruf klingelt das Telefon wieder normal.

### Am Mobilteil

Drücken Sie .







### Am Tischgerät

Drücken Sie **RUHE** oder .





## Wahlwiederholung

Ihr Telefon speichert die 10 zuletzt gewählten Rufnummern in einer Liste.

### Am Mobilteil

1. Drücken Sie im Ruhezustand .
2. Wählen Sie mit  und  oder durch wiederholtes Drücken von  den gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie  oder , um die Nummer zu wählen.

## Am Tischgerät

1. Drücken Sie im Ruhezustand .
2. Wählen Sie mit  oder durch wiederholtes Drücken von  den gewünschten Eintrag.
3. Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie , um die Nummer zu wählen.

## Anrufliste



**Hinweis:** Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Ihr Netzbetreiber das Dienstmerkmal CLIP (Anzeige der Rufnummer des Anrufers beim angerufenen Teilnehmer) freigeschaltet hat. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Die Telefonnummern eintreffender Anrufe werden in die Anrufliste eingetragen. Bei neuen Einträgen sehen Sie eine Meldung auf dem Display.



### Rückruf aus der Anrufliste am Mobilteil

1. Drücken Sie im Ruhezustand .
2. Wählen Sie mit  und  den gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie  oder , um die Nummer zu wählen.
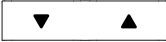
### Rückruf aus der Anrufliste am Tischgerät

1. Drücken Sie im Ruhezustand **ANRUFL..**
2. Wählen Sie mit  den gewünschten Eintrag.
3. Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie , um die Nummer zu wählen.

### Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern





1. Öffnen Sie die Anrufliste und wählen Sie einen Eintrag.
2. Drücken Sie am Tischgerät **SPEICH.** bzw. am Mobilteil .
3. Ändern Sie ggf. die Rufnummer und drücken Sie am Tischgerät **WEITER** bzw. am Mobilteil .

4. Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie am Tischgerät **WEITER** bzw. am Mobilteil  .






## Kettenwahl

Nutzen Sie diese Funktion um während eines Gesprächs eine im Telefonbuch, in der Wahlwiederholung oder in der Anrufliste vorhandene Rufnummer zu wählen.

### Eintrag aus Telefonbuch/Anrufliste

1. Drücken Sie während eines Gesprächs die Menütaste  bzw.  .
2. Wählen Sie **Telefonbuch** oder **Anrufliste** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil  .
3. Wählen Sie den gewünschten Eintrag und drücken Sie am Tischgerät **ANRUFEN** bzw. am Mobilteil  , um die Nummer zu wählen.

### Eintrag aus Wahlwiederholung

1. Drücken Sie während eines Gesprächs  bzw.  .
2. Wählen Sie mit den Pfeiltaste oder durch wiederholtes Drücken von  bzw.  den gewünschten Eintrag und drücken Sie am Tischgerät **ANRUFEN** bzw. am Mobilteil  , um die Nummer zu wählen.

## Mobilteil rufen (Sammelruf/Paging)

Sie können ein verlegtes Mobilteil suchen oder dem Benutzer eines Mobilteils signalisieren, dass Sie ihn sprechen möchten, indem Sie vom Tischgerät aus ein akustisches Signal auslösen.

### Sammelruf auslösen

Drücken Sie die Ruftaste an der rechten Seite des Tischgerätes, alle angemeldeten Mobilteile werden gerufen.

## Sammelruf stoppen

**Am Tischgerät:** Drücken Sie **STOPP** oder die Ruftaste noch einmal.

**Am Mobilteil:** Drücken Sie  oder  oder eine beliebige Zifferntaste, oder stellen Sie das Mobilteil in die Ladestation.


## Interngespräch

Zwischen jeweils zwei Telefonen können Sie interne Gespräche führen. Diese Gespräche sind kostenlos.



1. Drücken Sie die Menütaste  bzw. , wählen Sie **Intercom** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .

Sind nur 2 Geräte verfügbar, klingelt das andere sofort.

Wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind, wählen Sie das gewünschte Gerät aus und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .

2. Um das Gespräch am Tischgerät anzunehmen, heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie  oder eine beliebige Zifferntaste.



- oder -

Um das Gespräch an einem Mobilteil anzunehmen, drücken Sie  oder  oder eine beliebige Zifferntaste.



## Externes Gespräch intern weiterleiten



Sie können ein externes Gespräch vom Tischgerät zum Mobilteil oder umgekehrt weiterleiten.

### Vom Mobilteil zum Tischgerät




1. Drücken Sie während eines Gesprächs , wählen Sie **Weiterleiten** und drücken Sie .

Ist kein zusätzliches Mobilteil angemeldet, klingelt das Tischgerät sofort. Wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind,

- wählen Sie das gewünschte Gerät aus und drücken Sie  .
- Um das Gespräch am Tischgerät anzunehmen, heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie  oder eine beliebige Zifferntaste.  
- oder -







Um das Gespräch an einem weiteren Mobilteil anzunehmen, drücken Sie  oder  oder eine beliebige Zifferntaste.

### Vom Tischgerät zum Mobilteil


- Drücken Sie während eines Gesprächs , wählen Sie **Weiterleiten** und drücken Sie **AUSWAHL**.  
Bei nur einem angemeldeten Mobilteil klingelt diese sofort. Wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind, wählen Sie das gewünschte Gerät aus und drücken Sie **AUSWAHL**.
- Um das Gespräch am Mobilteil anzunehmen, drücken Sie  oder  oder eine beliebige Zifferntaste.

### Konferenz

Sie können mit dem Tischgerät, dem Mobilteil und einem externen Gesprächspartner eine Dreierkonferenz aufbauen.

- Sie führen ein externes Gespräch.
- Drücken Sie die Menütaste  bzw. , wählen Sie **Intercom** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil  .  
Sind nur 2 Geräte verfügbar, klingelt das andere sofort. Wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind, wählen Sie das gewünschte Gerät aus und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil  .
- Wenn der Internruf angenommen wurde, drücken Sie  bzw.  .












4. Wählen Sie **Anruf teilen** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil  .  
Die Konferenz ist aufgebaut.


## Telefonbuch

Im Telefonbuch können Sie bis zu 100 Einträge speichern, die für alle Geräte nutzbar sind. Einen Telefonbucheintrag finden Sie, indem Sie den ersten Buchstaben des gespeicherten Namens mit den Zifferntasten eingeben. Wählen Sie ggf. mit den Pfeiltasten den gewünschten Eintrag aus.

## Einen Telefonbucheintrag anlegen

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste  bzw.  .
2. Wählen Sie **Telefonbuch** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil  .
3. Wählen Sie **Kontakt zufüg.** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil  .
4. Geben Sie die Rufnummer ein  
- oder -  
Übernehmen Sie eine Rufnummer aus der Wahlwiederholung. Drücken Sie  bzw.  , wählen Sie den gewünschten Eintrag und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil  .
5. Drücken Sie am Tischgerät **WEITER** bzw. am Mobilteil  .
6. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie am Tischgerät **SPEICH.** bzw. am Mobilteil  .

## Telefonbucheinträge nutzen

Öffnen Sie das Telefonbuch (Tischgerät: **TEL-BUCH**, Mobilteil:  ) und wählen Sie den gewünschten Eintrag.


## Anrufen

**Tischgerät:** Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie  .

**Mobilteil:** Drücken Sie  oder  .

## Ändern

Drücken Sie am Tischgerät **BEARB.** bzw. am Mobilteil  .

Ändern Sie den Eintrag und drücken Sie zum Schluss am Tischgerät **SPEICH.** bzw. am Mobilteil  .


## Löschen

Drücken Sie am Tischgerät  bzw. am Mobilteil  . Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage (am Mobilteil mit  ) .


## Foto-Kurzwahl

Das Tischgerät verfügt über 4 Foto-Kurzwahltasten für Rufnummern, die Sie mit nur einem Tastendruck wählen wollen. Zum Öffnen der Deckel greifen Sie mit einem Fingernagel in die Aussparung an der unteren Seite und klappen den Deckel nach oben. Die Größe für die Einlagen beträgt ca. 18 x 20 mm.

## Foto-Kurzwahl speichern



1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste  .
2. Wählen Sie **Foto Kurzwahl** und drücken Sie **AUSWAHL.**
3. Wählen Sie die gewünschte Tasten-Nummer und drücken Sie **AUSWAHL.**
4. Geben Sie die Rufnummer ein und drücken Sie **WEITER.**
5. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie **SPEICH.**

## Foto-Kurzwahl ändern

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste  .
2. Wählen Sie **Foto Kurzwahl** und drücken Sie **AUSWAHL.**

3. Wählen Sie die gewünschte Tasten-Nummer und drücken Sie **AUSWAHL**.
4. Ändern Sie die Rufnummer ein und drücken Sie **WEITER**.
5. Ändern Sie den Namen ein und drücken Sie **SPEICH**.

## Foto-Kurzwahl löschen

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste .
2. Wählen Sie **Foto Kurzwahl** und drücken Sie **AUSWAHL**.
3. Wählen Sie die gewünschte Tasten-Nummer und drücken Sie . Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.

## Foto-Kurzwahl wählen

Drücken Sie im Ruhezustand die gewünschte Foto-Kurzwahl-taste. Der Lautsprecher wird eingeschaltet und die Rufnummer wird sofort gewählt.

## Erinnerungen



Mit der Erinnerungsfunktion können Sie sich durch eine Sprachnachricht, die auf dem Anrufbeantworter gespeichert wird, an wichtige Dinge erinnern lassen. Sie können einstellen, ob die Erinnerung einmal, täglich wöchentlich oder monatlich erfolgen soll.

Sie können bis zu 9 Erinnerungen speichern. Eine Erinnerung darf maximal 4 Minuten lang sein. Die Gesamtkapazität des Anrufbeantworters für Nachrichten und Erinnerungen beträgt ca. 30 Minuten.


Haben Sie eine Erinnerung eingegeben, weist Sie das Tischgerät sowie das Mobilteil zu gegebenem Zeitpunkt durch einen Hinweiston und eine Mitteilung im Display auf die Erinnerung hin.

Hören Sie die Erinnerungs-Nachricht immer bis zum Ende an. Danach geht das Telefon wieder in den Ruhezustand.








## Erinnerung am Mobilteil anhören

Wenn der Hinweis ertönt, drücken Sie  oder .






## Erinnerung am Tischgerät anhören



Wenn der Hinweis ertönt, heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie .

## Erinnerung hinzufügen



1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste  bzw. .
2. Wählen Sie **Erinnerung** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .
3. Wählen Sie **Erinn. einst.** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .
4. Geben Sie Tag, Monat und Jahr für die Erinnerung ein und drücken Sie am Tischgerät **WEITER** bzw. am Mobilteil .
5. Geben Sie die Uhrzeit ein und drücken Sie am Tischgerät **WEITER** bzw. am Mobilteil .
6. Sprechen Sie nach dem Signalton Ihre Erinnerungs-Mitteilung in das Mikrofon. Beenden Sie die Aufnahme mit **SPEICH.** am Tischgerät bzw. mit der **Taste 5** am Mobilteil.
7. Wählen Sie die gewünschte Häufigkeit aus und drücken Sie am Tischgerät **SPEICH.** bzw. am Mobilteil .

## Erinnerungen überprüfen

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste  bzw. .
2. Wählen Sie **Erinnerung** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .
3. Wählen Sie **Erinn. überpr.** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .
4. Die Erinnerungen werden nacheinander wiedergegeben. Mit  am Tischgerät bzw. **Taste 6** am Mobilteil springen Sie zur








nächsten Erinnerung. Drücken Sie  am Tischgerät bzw. **Taste 4** am Mobilteil um die aktuelle Erinnerung noch einmal zu wiederholen. Drücken Sie **zweimal**  am Tischgerät bzw. **Taste 4** am Mobilteil, um die vorherigen Erinnerung noch einmal abzuspielen.

## Erinnerung löschen


1. Drücken Sie, während die Erinnerung abgespielt wird, am Tischgerät  bzw. am Mobilteil .

## Einstellungen






### Ruftöne

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste  bzw. .
2. Wählen Sie **Ruftöne** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .
3. Wählen Sie **Rufton-Lautst.** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil . Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .  
- oder -  
Wählen Sie **Rufton-Klang** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil . Wählen Sie eine Melodie und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .

### Tastenton am Tischgerät






1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste .
2. Wählen Sie **Tastenton** und drücken Sie **AUSWAHL**.
3. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein und drücken Sie **AUSWAHL**.

# Töne am Mobilteil





1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste .
2. Wählen Sie **Töne** und drücken Sie .
  - **Tastenton**: Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein und drücken Sie .
  - **Akku leer**: Schalten Sie den Hinweiston für einen nahezu leeren Akku ein oder aus und drücken Sie .
  - **Außer Reichw.**: Schalten Sie den Hinweiston für eine kritische Entfernung von der Basisstation ein oder aus und drücken Sie .

# Zeit/Datum einstellen





Die Einträge in der Anrufliste wie auch die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter zeigen Uhrzeit und Datum des Anrufs an. Auch für die korrekte Wiedergabe von Erinnerungen ist es wichtig, dass Uhrzeit und Datum richtig eingestellt sind.

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste  bzw. .
2. Wählen Sie **Datum/Zeit** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .
3. Geben Sie Tag, Monat und Jahr ein und drücken Sie am Tischgerät **WEITER** bzw. am Mobilteil .
4. Geben Sie die Stunde und die Minuten ein und drücken Sie am Tischgerät **SPEICH.** bzw. am Mobilteil .

# Zeitformat einstellen







1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste  bzw. .
2. Wählen Sie **Zeitformat** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .
3. Wählen Sie **12 Stunden** oder **24 Stunden** und drücken Sie am Tischgerät **SPEICH.** bzw. am Mobilteil .

## Datumsformat einstellen

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste  bzw. .
2. Wählen Sie **Datumsformat** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .
3. Wählen Sie **MM/TT/JJ** oder **TT/MM/JJ** und drücken Sie am Tischgerät **SPEICH.** bzw. am Mobilteil .




## Displaysprache einstellen



Mit dieser Einstellung legen Sie fest, in welcher Sprache die Displaysanzeigen (Menü) dargestellt werden.

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste  bzw. .
2. Wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .
3. Wählen Sie **Displaysprache** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .
4. Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie am Tischgerät **SPEICH.** bzw. am Mobilteil .
5. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage am Tischgerät mit **JA** bzw. am Mobilteil mit .

## Sprache für Ansagen einstellen






Mit dieser Einstellung legen Sie fest, in welcher Sprache die voreingestellten Standard-Ansagen des Anrufbeantworters ausgegeben werden.

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste  bzw. .
2. Wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .

3. Wählen Sie **Ansagesprache** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil  .
4. Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Ansagen des Anrufbeantworters und drücken Sie am Tischgerät **SPEICH.** bzw. am Mobilteil  .





## Anzeige für MWI löschen

MWI bedeutet „Message Waiting Indication“ und bezeichnet die Signalisierung einer neuen Nachricht in einer Sprach-Mailbox, die Sie Ihnen Ihr Netzbetreiber möglicherweise zur Verfügung stellt. Mit der hier beschriebenen Prozedur können Sie die Signalisierung im Display löschen, ohne dass die Nachricht selbst gelöscht wird. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.



1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste  bzw.  .
2. Wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil  .
3. Wählen Sie **MWI löschen** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil  .
4. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage am Tischgerät mit **JA** bzw. am Mobilteil mit  .

## Gerätenamen ändern

Sie können die Namen von Tischgerät und Mobilteil ändern.






1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste  bzw.  .
2. Wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil  .
3. Wählen Sie **BS umbenennen** (Tischgerät) oder **MT umbenennen** (Mobilteil) und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil  .



4. Löschen Sie den vorhandenen Namen mit **LÖSCH**. (Tischgerät) bzw.  (Mobilteil) und geben Sie den neuen Namen ein.
5. Drücken Sie am Tischgerät **SPEICH.** bzw. am Mobilteil .




## CID Zeitsynchronisation



Erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber eine Zeitsynchronisation, werden Datum und Uhrzeit bei eintreffenden Anrufen automatisch eingestellt. Sie können diese Zeitsynchronisation ein- oder ausschalten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste  bzw. .
2. Wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .
3. Wählen Sie **CID Zeitsync.** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .
4. Wählen Sie **Ein** oder **Aus** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .

## Wahlverfahren einstellen






Das übliche Wahlverfahren an anlagen Anschlüssen ist „Tonwahl“. Beim Betrieb an einigen älteren Telefonanlagen muss das Wahlverfahren auf „Impulswahl“ umgestellt werden. Informationen dazu finden Sie im Handbuch Ihrer Telefonanlage.

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste  bzw. .
2. Wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .

3. Wählen Sie **Wahlverfahren** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .
4. Wählen Sie **Tonwahl** oder **Impulswahl** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .

## Flashzeit einstellen


Zur Nutzung von Netz-Leistungsmerkmalen ist ein so genanntes Flash-Signal mit einer bestimmten Länge notwendig. Informationen über verfügbare Netz-Leistungsmerkmale und die notwendige Flashzeit erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste  bzw. .
2. Wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .
3. Wählen Sie **Flashzeit** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .
4. Wählen Sie **Kurz, Mittel** oder **Lang** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .





## Weiteres Mobilteil anmelden (Tischgerät)

Sie können an Ihrem Tischgerät bis zu 4 Mobilteile betreiben. Neu zugekaufte Mobilteile (PowerTel 2701, als Zubehör erhältlich) müssen vor dem Betrieb angemeldet werden.

### Anmelden eines fabrikneuen PowerTel 2701:

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste .
2. Wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie **AUSWAHL**.
3. Wählen Sie **Anmeldung** und drücken Sie **AUSWAHL**.
4. Stellen Sie das Mobilteil in die Ladeschale. Nach kurzer Zeit ist das Mobilteil angemeldet.




## Auslieferungszustand wiederherstellen



1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste  bzw. .
2. Wählen Sie **Zurücksetzen** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .
3. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage am Tischgerät mit **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil mit .

## Ruhemodus

Sie können den „Ruhemodus“ für eine bestimmte Zeit (1 - 12 Stunden) einstellen. Während dieser Zeit werden alle Töne (außer Paging) sowie das Mithören von Anrufbeantworter-Nachrichten unterdrückt.

Wenn Sie den Ruhemodus einschalten, wird automatisch der Anrufbeantworter eingeschaltet. Ist die eingestellte Zeit für den Ruhemodus abgelaufen, bleibt der Anrufbeantworter eingeschaltet.

1. Drücken Sie im Ruhezustand die **Raute-Taste**  bzw.  und halten Sie sie für ca. 3 s gedrückt.
2. Geben Sie die gewünschte Dauer ein (1 - 12) und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .

Um den Ruhemodus auszuschalten, drücken Sie die **Raute-Taste**  bzw.  und halten Sie sie für ca. 3 s gedrückt.

# Anrufbeantworter


Der Anrufbeantworter kann bis zu 99 Nachrichten speichern. Sie können die maximale Nachrichtenlänge auf 1, 2 oder 3 Minuten einstellen. Die Gesamt-Aufzeichnungszeit für Nachrichten, Memos und Erinnerungen beträgt ca. 30 Minuten. Um immer ausreichend Kapazität für neue Mitteilungen zu haben, sollten Sie abgehörte Nachrichten löschen. Ist kein Platz mehr für neue Mitteilungen vorhanden, nimmt der Anrufbeantworter keine Gespräche mehr entgegen. Im Auslieferungszustand ist bereits eine Ansage vorhanden, die Sie durch eine persönliche Ansage ersetzen können (s. u.).

## Anrufbeantworter ein-/ausschalten




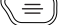
### Am Tischgerät

Drücken Sie die seitlich angebrachte Taste.

- oder -

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste  .
2. Wählen Sie **Anrufbeantw.** und drücken Sie **AUSWAHL.**
3. Wählen Sie **AB ein/aus** und drücken Sie **AUSWAHL.**
4. Wählen Sie **Ein** oder **Aus** und drücken Sie **SPEICH..**

### Am Mobilteil

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste  .
2. Wählen Sie **Anrufbeantw.** und drücken Sie  .
3. Wählen Sie **AB ein/aus** und drücken Sie  .
4. Wählen Sie **Ein** oder **Aus** und drücken Sie  .




# Nachrichten hören


## Am Tischgerät




Drücken Sie .

Sind sowohl alte als auch neue Nachrichten vorhanden, können Sie wählen, ob Sie die alten oder die neuen Nachrichten hören wollen. Sind nur alte oder nur neue Nachrichten vorhanden, werden diese direkt wiedergegeben.

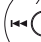Während eine Nachricht wiedergegeben wird, können Sie:

- die Wiedergabelautstärke mit  einstellen,
- mit  zur nächsten Nachricht springen,
- mit  zum Beginn der aktuellen Nachricht zurückkehren.

Drücken Sie  zweimal, um zur vorherigen Nachricht zu springen.

- mit  die aktuelle Nachricht löschen.
- mit  die Wiedergabe stoppen bzw. fortsetzen.
- mit  die Wiedergabegeschwindigkeit reduzieren.
- **RÜCKRUF** drücken, um den Anrufer anzurufen. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **JA**.

## Am Mobilteil

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste .







2. Drücken Sie , um **Nachr. hören** auszuwählen.

Sind sowohl alte als auch neue Nachrichten vorhanden, können Sie wählen, ob Sie die alten oder die neuen Nachrichten hören wollen. Sind nur alte oder nur neue Nachrichten vorhanden, werden diese direkt wiedergegeben.

Während eine Nachricht wiedergegeben wird, können Sie:

- die Wiedergabelautstärke mit den seitlichen Lautstärketasten einstellen,
- mit **Taste 6** zur nächsten Nachricht springen,
- mit **Taste 4** zum Beginn der aktuellen Nachricht zurückkeh-


ren. Drücken Sie **Taste 4** zweimal, um zur vorherigen Nachricht zu springen.

- mit  die aktuelle Nachricht löschen.
- mit  die Wiedergabe über den Hörer oder über den Lautsprecher umschalten.
- mit  die Wiedergabe im Hörer verbessern.
-  drücken, um den Anrufer anzurufen. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit . Wollen Sie nicht anrufen, drücken Sie .





## Eigene Ansage aufnehmen

Ihre eigene Ansage darf bis zu 90 Sekunden lang sein. Ansa- gen, die kürzer als 2 Sekunden sind, werden nicht gespei- chert.

### Am Tischgerät







1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste .
2. Drücken Sie **AUSWAHL**, um **Anrufbeantw.** auszuwählen.
3. Drücken Sie **AUSWAHL**, um **Ansage** auszuwählen.
4. Drücken Sie **AUSWAHL**, um **Neue Ans. aufn.** auszuwählen.
5. Sprechen Sie Ihre Ansage nach dem Signalton und drücken Sie zum Beenden **SPEICH..**

### Am Mobilteil

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste .
2. Wählen Sie **Anrufbeantw.** und drücken Sie .
3. Drücken Sie , um **Ansage** auszuwählen.
4. Drücken Sie , um **Ansage aufz.** auszuwählen.
5. Sprechen Sie Ihre Ansage nach dem Signalton und drücken Sie zum Beenden die **Taste 5**.



# Mithören

Sie können einstellen, ob eingehende Nachrichten am Tischgerät und am Mobilteil mitgehört werden können oder geräuschlos aufgezeichnet werden sollen. Die Einstellung gilt jeweils für beide Geräte gleichzeitig.


1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste  bzw. .
2. Wählen Sie **Anrufbeantw.** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .
3. Wählen Sie **AB Einstell.** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .
4. Wählen Sie **Mithören** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .
5. Wählen Sie **Ein** oder **Aus** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .




## Am Tischgerät

Ist das Mithören eingeschaltet und hat der Anrufbeantworter den Anruf angenommen, wird die Ansage sowie die Nachricht des Anrufers über den Lautsprecher wiedergegeben. Sie können währenddessen:

- die Wiedergabelautstärke mit  einstellen,
- mit  das Mithören temporär ausschalten,
- mit **RUHE** die Wiedergabe stumm schalten,
- mit **MITHÖR.** das Mithören temporär einschalten, wenn es generell ausgeschaltet ist.

## Am Mobilteil

Ist das Mithören eingeschaltet und hat der Anrufbeantworter den Anruf angenommen, drücken Sie  um die Ansage sowie die Nachricht des Anrufers über den Lautsprecher mitzuhören. Sie können währenddessen:

- die Wiedergabelautstärke mit den Lautstärketasten (seitlich am Mobilteil) einstellen,
- mit  das Mithören temporär ausschalten,
- mit  das Mithören temporär einschalten, wenn es generell ausgeschaltet ist.
- mit  die Wiedergabe über den Hörer oder über den Lautsprecher umschalten.

## Anruf übernehmen

Hat der Anrufbeantworter ein Gespräch bereits angenommen und Sie hören die Mitteilung des Anrufers, können Sie das Gespräch übernehmen.

### Am Tischgerät






Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie  .

### Am Mobilteil

Drücken Sie  oder  .

## Nachrichten löschen

Es können nur alte (bereits abgehörte) Nachrichten gelöscht werden.


1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste  bzw.  .
2. Wählen Sie **Anrufbeantw.** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil  .
3. Wählen Sie **Alte N. lösch.** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil  .
4. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage am Tischgerät mit **JA** bzw. am Mobilteil mit  .






# Memo aufnehmen

Ein Memo ist eine selbst vor Ort aufgezeichnete Nachricht, die z. B. anderen, die ebenfalls diesen Anrufbeantworter benutzen, hinterlassen werden kann. Memos werden wie neue Nachrichten signalisiert und wie „normale“ Nachrichten behandelt, können also genauso abgespielt und gelöscht werden.

## Am Tischgerät






1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste .
2. Drücken Sie **AUSWAHL**, um **Anrufbeantw.** auszuwählen.
3. Wählen Sie **Memo aufnehmen.** und drücken Sie **AUSWAHL.**
4. Sprechen Sie Ihr Memo nach dem Signalton und drücken Sie zum Beenden **SPEICH.**


## Am Mobilteil

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste .
2. Wählen Sie **Anrufbeantw.** und drücken Sie .
3. Wählen Sie **Memo aufnehmen.** und drücken Sie .
4. Sprechen Sie Ihr Memo nach dem Signalton und drücken Sie zum Beenden die **Taste 5.**

# Annahmeverzögerung einstellen






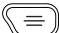
Sie können einstellen, nach wieviel Klingesignalen (2, 4, 6, 8 oder 10) der Anrufbeantworter ein Gespräch annehmen soll.

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste  bzw. .
2. Wählen Sie **Anrufbeantw.** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .
3. Wählen Sie **AB Einstell.** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .
4. Wählen Sie **# Rufe** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .

5. Wählen Sie einen Wert aus der Liste und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil  .







## Fernabfragecode einstellen

Zur Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters (von jedem Telefon möglich, das DTMF-Signale senden kann) ist ein Fernabfrage-Code notwendig, um die Nachrichten abhören zu können. Der voreingestellte Code ist „00“. Sie können eine beliebige Zahl zwischen „00“ und „99“ eingeben.

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste  bzw.  .
2. Wählen Sie **Anrufbeantw.** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil  .
3. Wählen Sie **AB Einstell.** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil  .
4. Wählen Sie **Fernabfr.-Code** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil  .
5. Geben Sie einen zweistelligen Code ein und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil  .







## Nachrichten-Hinweiston

Ist diese Funktion eingeschaltet, piept das Tischgerät alle 10 Sekunden, wenn eine neue Mitteilung auf dem Anrufbeantworter vorliegt. Dieser Hinweiston wird nur am Tischgerät ausgegeben. Sie können den Ton durch Drücken einer beliebigen Taste (außer der Ruftaste (Paging)) für dieses eine Mal ausschalten. Bei der nächsten neuen Nachricht wird er wieder ausgegeben.

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste  bzw. .
2. Wählen Sie **Anrufbeantw.** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .
3. Wählen Sie **AB Einstell.** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .
4. Wählen Sie **Hinw.ton Nachr** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .
5. Wählen Sie **Ein** oder **Aus** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .

## Aufnahmezeit einstellen

Sie können einstellen, wie lang eine Mitteilung im Höchstfall sein darf (1 Minute, 2 Minuten oder 3 Minuten).

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste  bzw. .
2. Wählen Sie **Anrufbeantw.** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .
3. Wählen Sie **AB Einstell.** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .
4. Wählen Sie **Aufzeichn.zeit** und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .
5. Wählen Sie einen Wert aus der Liste und drücken Sie am Tischgerät **AUSWAHL** bzw. am Mobilteil .

# Fernbedienung des Anrufbeantworters

Um auf Ihren Anrufbeantworter von einem entfernten MFV-fähigen Telefon zugreifen zu können, müssen Sie den zweistelligen Fernabfrage-Code eingeben.

1. Wählen Sie Ihren Anschluss von einem MFV-fähigen Telefon.
2. Ist der Anrufbeantworter eingeschaltet, wird der Anruf nach der voreingestellten Anzahl Klingelsignale angenommen. Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, wird der Anruf nach ca. 16 Klingelsignalen angenommen.
3. Geben Sie den zweistelligen Fernabfrage-Code ein. Sie hören einen Quittungston.
4. Drücken Sie die entsprechende Taste für die folgenden Möglichkeiten:
  - **Taste 2** - Alle Nachrichten abspielen
  - **Taste 4** - Zurück zur vorherigen Nachricht (während Wiedergabe)
  - **Taste 5** - Nachricht löschen (während Wiedergabe)
  - **Taste 6** - Nächste Nachricht abspielen (während Wiedergabe)
  - **Taste 7** - Anrufbeantworter einschalten
  - **Taste 9** - Anrufbeantworter ausschalten.

# Anhang

## Falls Probleme auftauchen

Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline wenden. Die Rufnummer finden Sie auf unserer Website [www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)

Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

**Einige Probleme lassen sich ganz einfach lösen, indem Sie die Telefone ausschalten. In diesem Fall sollten Sie für etwa 20 Minuten an der Basisstation (Tischgerät) das Netzteil ziehen (sind Stromausfall-Batterien eingelegt, bitte auch diese entfernen) und die Akkus aus dem Mobilteil nehmen. Wenn Sie dann den Stecker wieder anschließen und die Akkus wieder einlegen, ist das Problem möglicherweise bereits gelöst.**

## Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses analoge Telefon ist für den Anschluss an ein öffentliches Fernsprechnetzt oder eine zugelassene private Telefonanlage bestimmt. Jegliche andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch. Eigenmächtige Änderungen oder Umbauten sind nicht erlaubt. Auf keinen Fall dürfen Sie selbst Reparaturen durchführen.

## Aufstellungsort

Stellen Sie das Telefon folgendermaßen auf:

- Auf eine trockene, flache und feste Unterlage
- So, dass das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird
- Mindestens einen Meter von anderen elektrischen Geräten entfernt
- Gut geschützt vor Rauch, Staub, Vibration, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung.

**Beachten Sie bitte, dass das Steckernetzteil stets zugänglich sein muss.**

## Stromversorgung

**Wichtig: Benutzen Sie unbedingt nur die mit dem PowerTel 2880 gelieferten Netzteile.**

Wenn Sie im Tischgerät die Netzausfall-Batterien eingesetzt haben, können Sie Ihr Telefon auch bei Stromausfall uneingeschränkt nutzen. Bitte denken Sie daran, die Netzausfall-Batterien nach ca. 6 Monaten zu ersetzen, um deren Funktion zu gewährleisten.

## Energiesparendes Netzteil

Die zum Lieferumfang gehörigen Netzteile erfüllen die Öko-Design-Anforderungen der EU für energiebetriebene Produkte (Direktive 2005/32/EG). Der Energieverbrauch ist deshalb sowohl im Betriebs- als auch im Bereitzustand deutlich geringer als bei den Netzteilen älterer Modelle.

# Medizinische Geräte und Gefahren

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht:

- In der Nähe von Notfall- oder intensivmedizinischen Geräten
- Während eines Gewitters

Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, sollten Sie unbedingt Ihren Arzt fragen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

## Akkus/Batterien

Werfen Sie Akkus/Batterien auf keinen Fall ins Feuer oder in Wasser.

## Kompatibilität mit Hörgeräten

Dieses Telefon ist mit den meisten gängigen Hörgeräten kompatibel. Wir können allerdings nicht garantieren, dass dieses Telefon mit jedem Hörgerät in vollem Umfang nutzbar ist.

## Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!



## Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!

Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und

Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen und keinesfalls in den Hausmüll zu geben. Die Entsorgung ist unentgeltlich.

Lithium-Akkus und Akkupacks jedweder Art sollten nur im entladenen Zustand abgegeben werden. Treffen Sie unbedingt Vorsorge gegen Kurzschlüsse, z. B. durch das Isolieren der Pole mit Klebestreifen, da ansonsten das Risiko eines Brandes besteht.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



## Technische Daten

Standard	DECT
Stromversorgung (Tischgerät)	Eingang: 100-240V 50/60Hz Ausgang: 6 VDC 800 mA Hersteller und Modell (EU-plug): Chousen, CS6F060080FGF Tenpao, S006MV0600080
Stromversorgung (Ladestation)	Eingang: 100-240V 50/60Hz Ausgang: 6 VDC 450 mA Hersteller und Modell (EU-plug): Shenzen Rujing, RJ-AS060450E002 VTech, VT04EEU06045
Reichweite	Im Freien: ca. 300 m, Innen: ca. 50 m
Standby	Bis zu 100 Std.
Max. Gesprächsdauer	Bis zu 10 Std.
Maximale Hörerlautstärke	+40dB



Akkus	3 x AAA 1,2V 500mAh NiMH Hersteller und Modell: GPI , VT50AAAHC Corun, NI-MHAAAJ500
Wählmodus	Tonwahl (DTMF), Impulswahl
Flashzeit	Kurz (100 ms), Mittel (250 ms), Lang (600 ms),
Optimale Umgebungstemp.	0 °C bis 45 °C
Optimale relative Luftfeuchte	20 % bis 80 %

**Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Netzteile und Akkus!**

## Wartung

- Reinigen Sie die Oberfläche des Geräts immer mit einem weichen, flusenfreien Tuch.
- Verwenden Sie niemals Reinigungs- oder Lösungsmittel.

## Garantie

AMPLICOMMS-Geräte werden nach neuesten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Die Verwendung sorgfältig ausgewählter Materialien und hochentwickelter Technologien gewährleistet einen störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer. Die Garantiebedingungen gelten nicht, wenn die Ursache für eine Störung im Gerät beim Fernsprechnetzbetreiber oder in einer eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten wiederaufladbaren Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab dem Datum des Kaufs. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos be-

hoben. Der Garantieanspruch erlischt nach Eingriffen des Käufers oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, falsche Platzierung oder Lagerung, unsachgemäße Anschlüsse oder Installation, höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns das Recht vor, bei Reklamationen defekte Teile zu reparieren oder auszutauschen bzw. ein Ersatzgerät bereitzustellen. Ausgetauschte Teile oder Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, dem Hersteller kann Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden.

Sollte Ihr Gerät während der Garantiezeit einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihres Kaufbelegs an das Geschäft, in dem Sie Ihr AMPLICOMMS-Gerät erworben haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber dem Fachhändler geltend zu machen. Zwei Jahre nach dem Kauf der Produkte können keine Garantieansprüche mehr geltend gemacht werden.

## **Konformitätserklärung**

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 2014/53/EU.



Die Konformität mit der vorgenannten Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Die komplette Konformitätserklärung können Sie kostenlos von unserer Website unter **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)** herunterladen.