

Wekker met
trilkussen



NL

GEBRUIKSHANDLEIDING

Raadpleeg onze website www.geemarc.com voor een bijgewerkte handleiding, want er kunnen belangrijke herzieningen en wijzigingen zijn waarvan u zich bewust dient te zijn!

INSTALLATIE

Steek de AC/DC adapter in een wisselstroom (AC) stopcontact en steek daarna de gelijkstroom (DC) stekker in de achterkant van de klok. Uw klok zal nu werken. De contactdoos moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en moet gemakkelijk bereikbaar zijn.

PLAATSING VAN DE RESERVEBATTERIJ

Uw wekker moet één AA batterij (niet meegeleverd) hebben om de wekker noodstroom te geven in het geval er een tijdelijke stroomuitval optreedt.

1. Plaats uw apparaat met de voorkant naar beneden gericht op een vlak, zacht oppervlak.
2. Open het batterijdeksel dat zich aan de onderkant bevindt.
3. Steek een nieuwe AA batterij in het batterijvakje; let op de correcte '+' en '-' polariteit.
4. Sluit het batterijdeksel.


Om de wekker te laten functioneren is het niet nodig een reservebatterij er in te steken, maar **de reservebatterij zal de tijd bijhouden in geval van stroomuitval of loskoppeling van de AC/DC adapter. Als de AC voeding uitvalt zullen het alarm en de achtergrondverlichting niet werken.**

Controleer de conditie van de batterij eens per jaar en vervang zo nodig een oude batterij. Een lekkende batterij kan uw wekker

vernielen.

WAARSCHUWING: Explosiegevaar als een verkeerde vervangingsbatterij wordt gebruikt. Alleen maar vervangen met eenzelfde of vergelijkbaar type.

WAARSCHUWING: De batterij mag niet blootgesteld worden aan extreme hitte zoals zonneshijne, vuur en dergelijke.

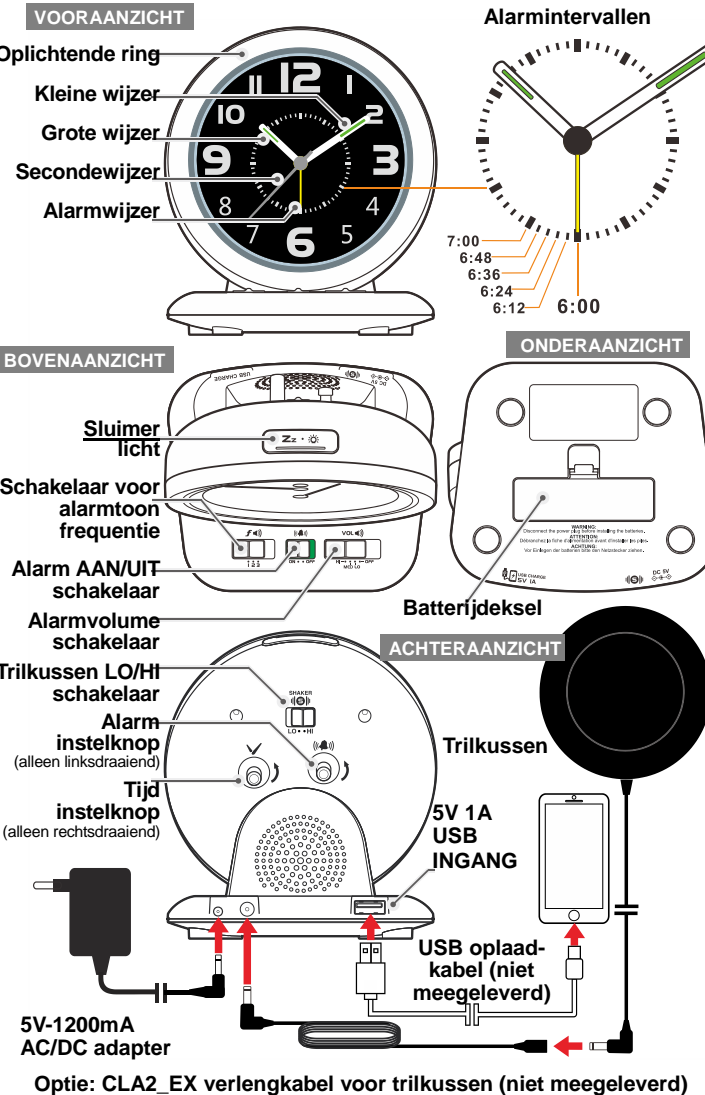

DE TIJD INSTELLEN

Draai de ✓ knop linksom om de huidige tijd in te stellen.

Opmerking: Draai de ✓ knop of de ((🔊)) wijzers **NOOIT** rechtsom; dit kan de bewegingen van de wekker beschadigen.

ALARMTIJD INSTELLEN (standaard is 6:00)

Draai de ((🔊)) alarmknop linksom om de alarmwijzer op de gewenste tijd te zetten. Elk segment of interval staat voor **12 minuten**.

Voor minimale tolerantie van de alarmtijd plaatst u de alarmwijzer exact op de door u gewenste alarminterval.

ALARM AAN/UIT (ON/OFF) KIEZEN

Om het alarm AAN te zetten zet u op willekeurig welk moment de ((🔊)) knop in de **ON** stand zodat een groene ondergrond zichtbaar wordt.

Om het alarm UIT te zetten zet u op willekeurig welk moment de ((🔊)) knop in de **OFF** stand.

ALARMTOON FREQUENTIE KIEZEN

Zet de ((🔊)) knop in de **1, 2 of 3** stand om tijdens een geactiveerde wekker de alarmtoon frequentie te kiezen.

- 1 (lage toon, 800 Hz)
- 2 (midentoon, 1 KHz)
- 3 (hoge toon, 1,5 KHz)

ALARMVOLUME KIEZEN

Zet de VOL ((🔊)) knop in de **HI, MED, LO** of **OFF** stand om tijdens een geactiveerde wekker het geluidsniveau van de zoemer te kiezen.

VIBRATOR (TRILKUSSEN) HI/LO KIEZEN

Zet de SHAKER ((🔊)) knop in de **HI** of **LO** stand om tijdens een geactiveerde wekker een hoog of laag niveau van vibratie te kiezen.

Verbindt de adapter van het trilkussen niet als u het trilkussen niet wilt gebruiken.

DE ALARMFUNCTIE STOPPEN

Wanneer de wekker geactiveerd is, zet u de ((🔊)) knop in de **OFF** stand.




SLUIMEREN GEBRUIKEN

Als de wekker afgaat, drukt u één keer op **Zz • ⚙️**; het alarm stopt tijdelijk. De wekker zal na 5 minuten weer afgaan.

HI-MED-LO DIMMER GEBRUIKEN (TIJDCLIJFERS)

Er is een helderheidsbediening met drie niveaus voor de achtergrondverlichting. Druk op **Zz • ⚙️** om de helderheid (**HI / MED / LO**) van de achtergrondverlichting te veranderen. Kan alleen als de klok niet afgaat.

DE RING VAN HET LED LICHT GEBRUIKEN

1. Druk op de **Zz** •  knop en houdt deze ingedrukt om de LED-licht ring aan te zetten; het helderheidsniveau van de LED ring (**Hi-Med-Lo**) komt overeen met de helderheid (**Hi-Med-Lo**) van de tijddisplay.
2. Wanneer de LED ring oplicht, drukt u elke keer eenmaal op de **Zz** •  knop om de helderheid van de tijddisplay en de LED ring te veranderen.
3. Druk op de **Zz** •  knop en houdt deze ingedrukt om de LED-licht ring uit te zetten.

UW MOBIELE APPARAAT OPLADEN VIA DE USB INGANG

Verbindt de oplaadkabel (niet meegeleverd) met de A-type USB ingang aan de achterkant van uw mobiel en daarna het andere uiteinde met uw mobiele apparaat. De wekker zal uw mobiele apparaat automatisch opladen.

NB:

1. *Zorg ervoor dat de met uw mobiel geleverde kabel voor opladen gebruikt kan worden.*
2. *Zorg ervoor dat de met uw wekkerradio meegeleverde originele adapter (5V 1,2A) wordt gebruikt om stroom te leveren aan de wekkerradio. Gebruik van andere adapters kan mogelijk uw mobiel niet opladen.*
3. *Het is niet mogelijk om een iPad® of notepad op te laden via de USB ingang van deze wekker.*
4. *Als de wekker afgaat/actief is, kunt u geen mobiele apparaten, enz. opladen via de USB ingang.*

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als uw wekker niet goed werkt, wat veroorzaakt kan worden door elektrostatische ontlading of een andere storing, trek dan de DC stekker uit de adapter van de wekker om de AC stroom te onderbreken (en verwijder de reservebatterij), laat de wekker een paar minute staan en steek daarna de stekker in de adapter om uw wekker opnieuw van stroom te voorzien.

GOED VOOR UW PRODUCT ZORGEN

1. Plaats uw klok op een stevig oppervlak, verwijderd van direct zonlicht of extreme hittebronnen of vocht.
2. Bescherm uw meubilair als u uw klok op natuurlijk hout of geverniste afwerking plaatst door een doek of beschermend materiaal te gebruiken tussen uw klok en het meubilair.
3. Maak uw klok schoon met een zachte doek, bevochtigd met milde zeep en water. Sterkere middelen zoals benzeen, verdunners en dergelijke materialen kunnen de behuizing van uw klok beschadigen. Zorg ervoor dat de wekker ontkoppeld is vóór het schoonmaken.
4. Om eventuele corrosie te voorkomen moet u de reservebatterij verwijderen als de wekker voor een maand of langer niet gebruikt wordt. Mocht het batterijvakje vuil of aangetast worden, maak dan het vakje grondig schoon en vervang de batterij.

SPECIFICATIES

Standaard instellingen	Tijd	10:10
	Alarm	6:00
	Alarm AAN/UIT	UIT (= OFF)
	Alarm geluidsfrequentie	1 (800Hz)
	Alarm volume	UIT (= OFF)
	Alarm Vibratieniveau	Hoog (= HI)
	Sluimerduur	5 minuten

GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u problemen ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op www.geemarc.com. Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is. De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.

VERKLARING: Hierbij verklaart Geemarc dat dit Wake 'n' shake Curve voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de radioapparatuur Richtlijn 2014/53/UE betreffende.

De nakomingsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com.

Elektrische verbinding: Dit apparaat is ontworpen om slechts te functioneren met 230V / 50Hz voeding. (Geclassificeerd als 'gevaarlijk voltage' volgens de EN62368-1 norm.) Het apparaat heeft geen geïntegreerde AAN/UIT schakelaar. Om de voeding uit te schakelen moet u de voeding van het lichtnet uitschakelen of de wisselstroomadapter uit de wandcontactdoos halen. Zorg er bij installatie voor dat u gemakkelijk bij de contactdoos van het lichtnet kunt komen.

RICHTLIJNEN VOOR HERGEBRUIK

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt te maken.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil.

Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container. Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.
- Of geef het oude product aan uw winkelier. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.

Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op www.geemarc.com.

E-mail : customerservices@geemarc.com



Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France

Dit product is in China gemaakt voor Geemarc Telecom.

Hua Xu Electronics Factory
HX075-0501200-AG-001 / HX075-0501200-AB
AC100 – 240V ~ 50/60Hz
DC5V 1,2A 6,0W
Gemiddelde actieve efficiëntie: ≥75%
Opgenomen vermogen in niet-belaste toestand: ≤0,1W



QUGWake&Shake_Vintage_Nederlands_A3_V1.0