

BEST PRACTICE

PERFECTDOME CHECKLIST ✓



Utilisez une lingette de nettoyage pour vos appareils auditifs afin d'éliminer la saleté extérieure avant de les placer dans le PerfectDome.



Pour les appareils auditifs rechargeables, connectez la station de charge au PerfectDome. Cela garantit que vos appareils auditifs se rechargent tout en étant entretenus.



Assurez-vous que le couvercle est correctement fermé avant d'allumer le PerfectDome. Ceci est essentiel pour le bon fonctionnement des fonctionnalités de séchage et de désinfection par UV-C.



Laissez le PerfectDome terminer son cycle complet pour obtenir les meilleurs résultats. L'appareil s'éteindra automatiquement une fois le cycle terminé.



Débranchez le PerfectDome lorsqu'il n'est pas utilisé, surtout si vous souhaitez économiser de l'énergie. Cela est également meilleur pour l'environnement.



Nettoyez le PerfectDome chaque semaine et veillez à ce que l'intérieur reste sec pour garantir une longue durée de vie et une hygiène optimale.



Nettoyez et séchez vos appareils auditifs chaque soir avec le PerfectDome. Cela améliore l'hygiène, augmente le confort et prévient les dysfonctionnements.
